

## UPUTE

Klikom na **Preuzimanje snimaka** na početnoj stranici ili u izborniku Za doktore otvoriti će se novi prozor. Kako bi preuzeli tražene dokumente u polja unesite podatke koje ste primili putem e-pošte i pritisnite dohvati. Na desnoj strani pojaviti će se dokumenti spremni za preuzimanje.

- Intraoralne snimke biti će vidljive u formatu slike.
- Ekstraoralne snimke biti će vidljive u formatu slike i arhiva slike.
- CBCT 3D snimke biti će vidljive u formatu arhiva 3D.

Klikom na **slike** otvara se prikaz snimke. Desnim klikom i odabirom -Spremi sliku kao (-Save image as) možete pohraniti snimku na svoje računalo.

Pod **arhiva slike** spremljena je mapa koja sadrži originalnu kvalitetu ekstraoralne 2D pretrage u DICOM formatu i Scanora Lite preglednik. Za pokretanje preglednika potreban je Windows operativni sustav.

Klikom na **arhiva slike** otvara se prozor za pohranu sadržaja na vaše računalo. Nakon pohrane otvorite .zip mapu i pokrenite ScanoraLite.exe program. Otvoriti će se Scanora Lite preglednik sa željenom pretragom. Scanora Lite omogućava Vam dodatno podešavanje parametara kontrasta, svjetline, krivulja, oštine i mnogih drugih prema Vašim željama. Svi ovdje navedeni sadržaji dostupni su i na CD-u.

Pod **arhiva 3D** spremljene su CBCT pretrage sa OnDemand3DDentalLite preglednikom. Za pokretanje preglednika potreban je Windows operativni sustav.

Klikom na **arhiva 3D** otvara se prozor za pohranu sadržaja na vaše računalo. Nakon pohrane otvorite .zip mapu i OnDemand3DDental\_data mapu. Pokrenite CDViewer.exe program. Otvoriti će se OnDemand3DDentalLite preglednik sa željenom pretragom. Kratke upute za korištenje preglednika OnDemand3D\_CD\_Viewer\_Instructor.pdf nalaze se u OnDemand3DDental\_data mapu. Svi ovdje navedeni sadržaji dostupni su i na CD-u.

Za sve upite i savjete slobodno nas kontaktirajte.